

## Dexoftyal MD krople do oczu 15ml



Cena: 37,97 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Postać	krop.do oczu
Producent	VERCO
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### DEXOFTYAL MD Regenerujące krople do oczu

**Dexoftyal MD** regenerujące krople do oczu to sterylne, lepkie, przezroczyste krople nawilżające przeznaczone dla podrażnionych oczu. Dexoftyal MD regenerujące krople do oczu **pobudza i wspomaga procesy regeneracyjne rogówki oka**. Dzięki właściwościom mukoadhezyjnym składnika HydraFlex film łzowy na powierzchni oka jest zachowany i powierzchnia oka jest chroniona. Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

- regenerują
- nawilżają
- dobrze tolerowane
- polecane przy soczewkach kontaktowych

**Dexoftyal MD** regenerujące krople do oczu jest również przeznaczony dla osób noszących różnego rodzaju soczewki kontaktowe. **Zwiększa komfort noszenia soczewek kontaktowych oraz zapewnia właściwą pielęgnację powierzchni oka.**

Regenerujące krople do oczu Dexoftyal MD \*chronią i nawilżają oczy \*w przypadku ich podrażnienia. Po zastosowaniu kilku kropli uczucie dyskomfortu ulega zmniejszeniu.

Krople do oczu Dexoftyal MD mogą być stosowane bez specjalnych ograniczeń i **są dobrze tolerowane**. Można je stosować także u kobiet w ciąży w przypadku zespołu suchego oka.

#### Kiedy stosować krople do oczu Dexoftyal MD?

Podrażnienie lub pieczenie oczu, a także ich zaczerwienienie i uczucie zmęczenia mogą być wywołane przez różne czynniki, takie jak:

- podrażnienie spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych
- długotrwałe patrzenie na ekran, przemęczenie bądź prowadzenie pojazdów
- klimatyzacja, wiatr, zanieczyszczenie powietrza, woda w basenie itp.
- zespół suchego oka w czasie ciąży (spowodowany zmianami hormonalnymi).

### Sposób użycia preparatu Dexoftyal MD 15 ml

Dexoftyal MD regenerujące krople do oczu można stosować na dwa sposoby: bezpośrednio do oczu lub za pośrednictwem soczewek kontaktowych.

Stosowanie bezpośrednio do oczu:

- (osoby noszące szkła kontaktowe nie muszą ich wyjmować)
- Przyłożyć palec wskazujący do dolnej powieki oka i lekko ją pociągnąć w dół
- Posługując się drugą ręką, zbliżyć końcówkę pojemnika do dolnej powieki oka; uważać, aby końcówka nie dotykała powierzchni oka!
- Zakropić 1 lub 2 krople do każdego oka i zamrużyć 2 lub 3 razy, aby preparat został równomiernie rozprowadzony na powierzchni całego oka

Stosowanie za pośrednictwem soczewek kontaktowych:

- ułożyć soczewkę na środkowym palcu;
- nałożyć 1 lub 2 krople na soczewkę, a następnie włożyć soczewkę do oka;
- zamrużyć okiem 2 lub 3 razy.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:

Nie stosować razem z innymi lekami do oczu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie używać w przypadku zakażenia oczu. Nie stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik preparatu.

### Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od 5° do 25°C